


Instruções Passo a Passo

Apenas 3 passos



Passo 1:
Adicione 10
microlitros
de amostra

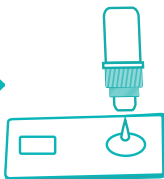

Passo 2:
Adicione 2 gotas
de Diluente
(contido no kit)



Resultado



Passo 3: Leia o Resultado
entre 15 e 20 minutos



Sistema da Qualidade
Certificado



Fm702891

+55 11 94203 6150

+55 11 5060 4700

comercial.covid19@nldiagnostica.com.br

www.nldiagnostica.com.br

Distribuidor exclusivo no Brasil:



IVD Trusted Solutions Since 1985