

Instant-View® Plus

COVID-19 Antigen test



O Instant-View® Plus COVID-19 Antigen Test é um teste rápido de triagem para a detecção qualitativa do vírus SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de pacientes sintomáticos.

INSTANT-VIEW® PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST				
		POS	NEG	SUB
PCR & Status Clínico	POS	23	0	23
	NEG	2	25	27
Subtotal		25	25	50



RESULTADOS ENTRE

3 E 7 MINUTOS.

➤ **ESPECIFICIDADE: 100%**
SENSIBILIDADE: 92%

- **Kit completo:** swab para coleta, tubo de extração e cassete de teste.
- **20 testes por kit.**




ALFA PRODUCTS DEVELOPED IN THE USA
MANUFACTURED IN THE USA | SHIPPED FROM THE USA



IVD Trusted Solutions Since 1985


PROCEDIMENTO DO TESTE

1.

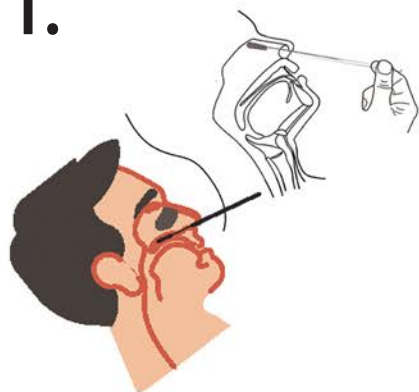


COLETA DE SECREÇÃO NASAL

2.

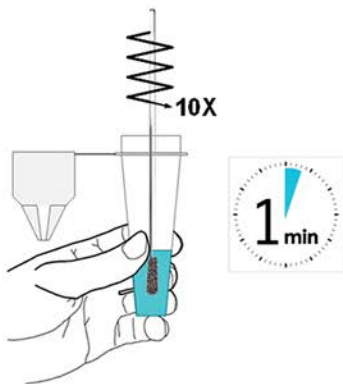


INSERIR SWAB NO TUBO DE EXTRAÇÃO

3.

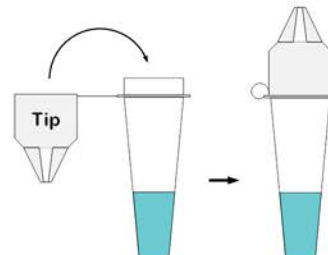

FECHAR A TAMPA DO TUBO DE EXTRAÇÃO

4.

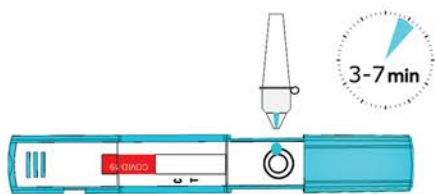

APLIQUE 3 GOTAS E FECH E O CASSETE

5.



INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

CÓDIGO

AS.05-9315

APRESENTAÇÃO

20 testes

Registro na Anvisa/MS nº: 10230730134



CLIQUE AQUI E CONHEÇA
AS DEMAIS SOLUÇÕES COVID

SISTEMA DA QUALIDADE
CERTIFICADO:



FM702891



+55 11 94203 6150



+55 11 5060 4700



comercial.nl@nldiagnostica.com.br



www.nldiagnostica.com.br



IVD Trusted Solutions Since 1985